

medisana

LT Naudojimo instrukcija Masazinė sėdynė MC 825

Prietaisai ir valdymo elementai



Simbolių paaiškinimas

Masazinė sėdynė naudojama tik uždarose patalpose!

30 Kąklą masažuojančių galvutė užvilkiama 1 galite skalbti maks. 30 °C temperatūroje, įprastine skalbimo programa! Laikykite nurodymų, pateiktų etiketėje!

Nevalykite cheminiu būdu!

Nenaudokite masazinės sėdynės drėgnose patalpose (pvz., vonioje arba duše).

SVARBU! Nesilaikant pateiktų nurodymų galima sunkiai susižeisti arba padaryti didelės žalos prietaisui.

ISPĖJIMAS Privalote laikytis šio įspėjamojo nurodymo, kad išvengtumėte galimų naudotojų sužeidimų.

DĖMESIO! Šių nurodymų laikytis būtina, siekiant išvengti galimų prietaiso pažeidimų.

NURODYMAS Šie nurodymai jums suteikia naudingos papildomos informacijos apie įrenginį ir naudojimą.

II apsaugos klasė

LOT Partijos numeris

Gamintojas

LT Saugos nurodymai

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją, ypač saugos nurodymus ir saugokitės ją, jei prireiktų vėliau. Perduodami prietaisą tretiesiems asmenims, būtina perduokite ir šią naudojimo instrukciją.



- Prietaisą naudokite tik pagal naudojimo instrukcijoje aprašytą paskirtį. Prietaisą naudokite tik pagal naudojimo instrukcijoje aprašytą paskirtį. Naudojant ne pagal paskirtį, garantija negalioja.
- Prietaisas neskiriam naudoti komerciniams tikslais arba medicinos srityje.
- apie maitinimą**
- Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitinkinkite, kad jūsų elektros tinklo įtampa yra tokia, kaip nurodyta aprašo plokštelėje.
- Tinklo kištuką į kištukinį lizdą jungkite tik tuomet, kai prietaisas išjungtas.
- Elektros laido ir prietaiso nelaikykite karštyje, šalia kaitusių paviršių, drėgmės ir skysčių. Niekada kištuko arba elektros jungtiklo neimkite šlapiomis ar drėgnomis rankomis arba būdami vandenyje.
- Negriebkite prietaiso, jei jis įkrito į vandenį. Iškart ištraukite tinklo kištuką.
- Prietaisą prijunkite taip, kad kištukas būtų lengvai pasiekiamas.
- Pasinaudoję prietaisu jį iš karto išjunkite naudodami mygtukus valdymo pulte ir iš elektros tinklo ištraukite tinklo kištuką.
- Norėdami prietaisą išjungti iš elektros tinklo, visuomet traukite kištuką, o ne elektros laidą.
- Neneškite, netraukite arba nesukite prietaiso paėmę jį už elektros laido.
- Jei tinklo laidas sugadintas, kad būtų išvengta sužeidimų, jį pakeisti gali tik įgaliotasis gamintojo prekybininkas arba atitinkamą kvalifikaciją turintis asmuo.
- Netinkamai naudojant laidą ir valdymo prietaisą gresia užspringimo arba užkliuvimo pavojus. Naudotojas yra atsakingas už tinkamą elektros laido buvimą vieta.

Dėl ypatingų asmenų

- Šį prietaisą gali naudoti vyresni, nei 8 metų vaikai ir sutrikusių fizinių, juslinių ar protinių gebėjimų asmenys arba mažai žinių ir patirties turintys asmenys, prižiūrimi arba išmokyti saugiai naudoti prietaisą ir supranta, kokių pavojų gali kilti.
- Vaikams su prietaisu žaisti draudžiama.
- Nenaudokite šio prietaiso kaip atramos arba kaip medicinos priemonių pakaitalo. Lėtinės ligos ir simptomai gali dar pasunkėti.
- Neturėtumėte naudoti masažo prietaiso arba pirmiausia dėl to turėtumėte pasitarti su gydytoju, jei:
 - esate nėščia,
 - jums implantuotas širdies stimulatorius, dirbtinis sąnarys arba elektroninis implantas.
 - sergate viena ar keliomis iš šių ligų arba turite tokių nusiskundimų: kraujotakos sutrikimai, venų varikozė, atviros žaizdos, kraujosruvos, odos įtrūkimai, venų uždegimai.
- Prietaiso nenaudokite prie akių ir prie kitų jautrių kūno vietų.
- Pajutę skausmus arba jei masažas jums būtų nemalonus, nutraukite naudojimą ir pasitarkite su savo gydytoju.
- Elkitės atsargiai naudodami šildymo funkciją. Prietaiso paviršius įkaitęs. Nenaudokite kūdikiams, bėgėjams ir karščiui neįautriems asmenims.
- Esant neišaiškams pobūdžio skausmams, jei esate gydytojo priežiūroje ir (arba) naudojatės medicininiais prietaisais, prieš naudodami masažo prietaisą pasitarkite su savo gydytoju.

- Prieš naudojant prietaisą**
- Prieš kiekvieną kartą naudodami patikrinkite, ar nepažeistas laidas, valdymo pultas ir masazinė sėdynė. Sugedusio prietaiso naudoti negalima.
 - Nenaudokite prietaiso, jei yra matomų prietaiso arba laido dalių pažeidimų, jei jis tinkamai neveikia, jei sėdynė arba valdymo pultas nukrito arba sudrėko. Kad išvengtumėte kylančių pavojų, atiduokite taisyti klientų aptarnavimo centrui.
 - Elektros prietaiso nelaikykite ir nesaugokite vietose, kuriose jis galėtų įkristi į vonią ar kriauklę.
 - Prietaisą naudokite tik tinkamoje padėtyje, t. y. kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje.

- Prietaiso nenaudokite, kai miegate arba gulite lovoje.
- Prietaiso nenaudokite prieš miegą. Masažas turi stimuliuojantį poveikį.
- Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu vairuojate transporto priemonę arba valdote įrenginį.
- Ilgiausia vieno masažo seanso trukmė yra 15 minučių. Ilgesnė naudojimo trukmė sutrumpina prietaiso tarnavimo trukmę ir raumenys vietoj to, kad atsipalaiduotų, gali įsitempti.
- Dėl per ilgos naudojimo trukmės prietaisas gali perkaisti. Prieš pradėdami naudoti vėl, leiskite prietaisui atvėsti.
- Nedėkite ir nenaudokite prietaiso prie pat elektrinės krosnelės arba kitų karščio šaltinių.
- Nenaudokite masazinės sėdynės, jei ji sulankstyta.
- Nepalikite prietaiso be priežiūros, jei jis jungtas į elektros tinklą.
- Stebėkite, kad prietaisas nesiliestų su smalais arba aštriais daiktais.
- Neuždenkite prietaiso, kai jį naudojate. Prietaiso jokiū būdu nenaudokite po antklode arba pagalve. Kyla užsiliepsnojimo, elektros smūgio ir sužeidimo pavojus.
- Įsitinkinkite, kad tarp besisukančių masažuojančių galvutėlių nėra pirštų ar kitų kūno dalių. Pavojus susižaloti!
- Niekada nesėskite arba nestokite ant judančių prietaiso dalių visu svoriu ir ant ju nedėkite daiktų.
- Nenaudokite laikmačių arba išorinių nuotolinio valdymo įtaisų, kad galėtumėte naudoti prietaisą.
- Nenaudokite prietaiso, kai iš flakonų purškiamas aerozolis arba tuo pačiu metu naudojamas deguonis.

apie priežiūrą ir valymą

- Techninė priežiūra prietaisui nereikalinga. Jei vis dėl to vėl atsirastų triktis, patikrinkite, ar tinkamai prijungtas maitinimo blokas. Neatitraukite užtrauktuko. Po juo nėra dalių, kurias naudotojas turėtų valyti ar atlikti techninės priežiūros darbus.
- Patys galite prietaisą tik valyti. Jei prietaisas neveikia arba sugedo, neremontuokite jo patys, nes tokiu atveju garantija nebegalios. Teiraukitės savo pardavėju ir remonto darbus paveskite atlikti tik įgaliotoms klientų aptarnavimo tarnyboms, kad išvengtumėte galimų grėsmių.
- Prietaiso niekada nenardinkite į vandenį arba kitus skysčius. Jei vis dėl to į prietaisą pateko skysčio, nedelsdami ištraukite kištuką.
- Valyti ar atlikti naudotojų priklausančius techninės priežiūros darbus neleidžiama atlikti vaikams be priežiūros.

Naudojimas pagal paskirtį

Prietaisas skirtas pačiam masažuoti tam tikras kūno dalis ir atsipalaiduoti bei geriau pasijusti. Jis nėra skirtas naudoti medicininiais gydymaisiais tikslais. Jis neskiriam naudoti klinikoje, masažo kabinetuose, sveikatingumo centruose ir t. t. Masažo prietaisas nėra medicininės paskirties prietaisas ir skirtas tik skausmui gydyti. Jei dvejojate ar nesate tikri, prieš naudodami prietaisą, pasitarkite su savo gydytoju.

ISPĖJIMAS
Saugokitės, kad pakuotės plėvelė nepatektų vaikams į rankas! Kyla pavojus uždusti!

Prietaisai ir valdymo elementai

- 1 2 reguliuojamo aukščio masažuojančios galvutės kaklui / pečiams („Šiatsu“ masažas) su nuimama danga
- 2 aukščio reguliavimo sukamasis ratukas;
- 3 2 trimatės vibruojančios dvigubo masažo galvutės („Šiatsu“ masažas)
- 4 mygtukas įjungti / išjungti
- 5 „Neck“ mygtukas (įjungia (išjungia) kaklo ir (arba) pečių srities masažo funkciją);
- 6 „Demo“ (demonstracinio režimo) mygtukas (parodo visas masažo funkcijas);
- 7 „Full“ (įjungia / išjungia visos nugaros srities masažą)
- 8 „Upper“ mygtukas (įjungia (išjungia) viršutinės nugaros dalies masažo funkciją);
- 9 „Spot“ mygtukas (įjungia (išjungia) nugaros taškinio masažo funkciją);
- 10 „Lower“ mygtukas (įjungia / išjungia apatinės nugaros srities masažą)
- 11 AIR PRESSURE mygtukas (įjungia / išjungia akupresūros masažą liemens srityje, parenka pakopą: žema, vidutinė, aukšta)
- 12 „Heat“ (šildymo) mygtukas (įjungia (išjungia) šildymo funkciją).

Pakuotės turinys

- Pirmausia patikrinkite, ar netrūksta prietaiso dalių ir ar prietaisas nepažeistas. Jei abejojate, prietaiso nenaudokite ir kreipkitės į savo pardavėją arba klientų aptarnavimo tarnybą.
Pakuotės turinį sudaro:
- 1 medisana masazinė sėdynė MC 825
 - 1 naudojimo instrukcija

Jei išpakavę pastebėjote transportavimo pažeidimų, nedelsdami susisiekiate su savo pardavėju.

Kaip naudoti prietaisą?

- Uždėkite „Šiatsu“ masazinę sėdynę ant aukštos kėdės ar krėslė ir diržais pritvirtinkite užpakalinę pusę.
- Atkreipkite dėmesį, kad atlošas būtų tinkamo aukščio, kad galėtumėte išlaikyti taisyklingą laikyseną.
- Įkiškite kištuką į elektros lizdą. Pasirūpinkite, kad prie ju būtų galima lengvai prieiti.
- Tada atsisėskite ant „Šiatsu“ masazinės sėdynės ir susipažinkite su prietaiso funkcijomis.
- Atsisėskite patogiai ir tiesiai. Stebėkite, kad sėdint centre masažo galvutės 4 galėtų judėti abiejose stuburo pusėse.
- Valdymo pulto mygtukais masazinę sėdynę galite reguliuoti. Įjunkite prietaisą, paspausdami įjungimo (išjungimo) mygtuką 4. Prietaisas yra prisidarytoje veiksenoje. Jei nepaspaudžiate mygtuko, praėjus 15 minučių prietaisas automatiškai išsijungia.
- Masažą galite nutraukti bet kuriuo metu paspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką 4. Jei prietaisą išjungiate tokiu būdu, kai yra įjungtos masažo funkcijos, iš karto sustabdomas masažas tik kaklo / pečių srityje ir liemens srityje bei šilumos funkcija. Tik tada nugaros sritį masažuojančios galvutės nusileidžia į stovėjimo padėtį. Tuo metu mirksi šviesos diodas, o po to užgessta.
- Prieš pradėdami naudoti vėl, leiskite prietaisui visiškai atvėsti.

Valymas ir priežiūra

- Prieš pradėdami valyti prietaisą, įsitinkinkite, kad prietaisas išjungtas ir iš elektros tinklo ištrauktas kištukas. Atvėsusį prietaisą valykite tik drėgna ir minkšta pašluoste.
- Jokiū būdu nenaudokite stiprių valiklių, šiuurščių šepetėlių, tirpalų arba alkoholio. Tai gali neigiamai paveikti paviršių.
- Valdami niekuomet nepanardinkite į vandenį ir prižiūrėkite, kad į prietaisą nepatektų vandens.
- Jei norite nuimti kaklą masažuojančių galvutėlių 4 užvalkalą, kad jį išvalytumėte, atsekite užtrauktuko. Apvalkalą skalbkite maks. 30 °C, įprasta skalbimo programa ir laikykite nurodymų, pateiktų etiketėje!
- Prietaisą vėl naudokite tik tuomet, kai jis visiškai sausas.
- Išvyniokite laidą, jei jis persisukęs.
- Geriausia prietaisą sudėkite į originalią pakuotę ir laikykite saugioje, švarioje, vėsioje ir sausoje vietoje.

Utilizavimas

- Šio prietaiso negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kiekvienas naudotojas privalo visus elektrinius arba elektroninius prietaisus, nepriklausomai nuo to, ar juose yra nuodingų medžiagų, ar ne, perduoti savivaldybės arba komerciniams surinkimo punktam, kad jie būtų tinkamai sutvarkyti ir neužterštų gamtos. Dėl utilizavimo kreipkitės į savo savivaldybės pareigūnus arba į savo prekybininką.

Techniniai duomenys

Pavadinimas ir modelis: **medisana** masazinė sėdynė **MC 825**

Maitinimas:	220–240 V ~ 50–60Hz
Galia:	40 vatų
Matmenys:	maždaug 84 x 19 x 48 cm
Svoris:	maždaug 7 kg
Laikymo sąlygos:	švariai ir sausiai
Gaminio numeris:	88939
EAN numeris:	40 15588 88939 4

Nuolat tobulindami savo gaminius, pasiliekiame teisę atlikti techninius ir optinius pakeitimus.

Aktualią šios naudojimo instrukcijos redakciją rasite adresu www.medisana.com.

Garantijos ir remonto sąlygos

Garantiniu atveju kreipkitės į savo specializuotą parduotuvę arba tiesiai į techninės priežiūros skyrių. Jei prietaisą prireiktų atsiųsti, nurodykite trūkumą ir pridėkite pirkimo čekio kopiją. Taikomos šios garantinės sąlygos:

1. **medisana** gaminiams nuo pardavimo datos suteikiama 3 metų trukmės garantija. Garantiniu atveju pardavimo data reikią įrodyti pirkimo kvitu arba sąskaita faktūra.
2. Medžiagų ar gamybos trūkumai garantijos galiojimo laikotarpiu šalinami nemokamai.
3. Atlikus garantinį aptarnavimą, garantijos laikas nepraešiamas nei prietaisui, nei pakeistam konstrukciniam elementui.
4. Garantija netaikoma:
 - a. bet kokiems pažeidimams, kurie atsirado netinkamai elgiantis su prietaisu, pvz., nesilaikant naudojimo instrukcijos.
 - b. gedimams, atsiradusiems dėl pirkėjo ar trečiojo asmens remonto darbų ar įsiklūpimo.
 - c. transportavimo pažeidimams, atsiradusiems pakeliant iš gamintojo pas vartotoją arba siunčiant prietaisą į techninės priežiūros tarnybą;
 - d. natūraliai nusidėvinčioms atsarginėms dalims.
5. Atsakomybė už tiesioginius arba netiesioginius dėl prietaiso atsiradusius nuostolius netaikoma net jei prietaiso pažeidimas pripažįstamas garantiniu atveju.

medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, DEUTSCHLAND (VOKIETIJA)

